



MERKBLATT

Gebrauchsanleitung Schuheinlagen

Das ausgelieferte orthopädische Hilfsmittel wurde individuell nach Ihren Füßen, und falls vorhanden, entsprechend der ärztlichen Verordnung hergestellt. Es ist nicht zur Weitergabe an andere Personen geeignet.

Schuhleinlagen erfordern Gewöhnungszeit. Gut möglich, dass Sie anfänglich muskuläre Verspannungen in Füßen und Beinen spüren, verursacht durch die veränderte Fussstellung. Empfinden Sie die Stützwirkung als sehr intensiv, empfehlen wir Ihnen die Einlagen zur Gewöhnung nur temporär zu tragen (Beispiel: Morgen mit Einlagen / Nachmittag ohne Einlagen). Bekunden Sie immer noch Mühe damit, so verkürzen Sie die Tragedauer und steigern dann kontinuierlich. Der vereinbarte Kontrolltermin ermöglicht uns allfällige Korrekturen und dient zur Überwachung der Funktion.

Falls Ihnen das ständige Wechseln der Einlagen zu mühsam wird, fertigen wir Ihnen gern ein 2. Paar an (z.B. für Haus-, Sport- oder Arbeitsschuhe). Bei Nachbestellung innerhalb eines Monats nach dem ersten Kontrolltermin gewähren wir Ihnen 20% Rabatt.

Waschen Sie Ihre Einlagen bei Schmutz- und Geruchsbildung mit lauwarmem Wasser und Seife (feuchte Einlagen nicht auf der Heizung trocknen lassen). Einlagen nach Gebrauch lüften. Verbrannte oder abgenutzte Überzüge können jederzeit ersetzt werden.

In feinen und eleganten Schuhen finden oft nur Einlagen mit stark reduzierter Stützwirkung Platz. Auch in offenen Schuhen und Sandalen ist es möglich Einlagen zu tragen. Erkundigen Sie sich bei Interesse bei uns.

Die Tragezeit unseres Produkts ist begrenzt. Es kommt zu Materialermüdung und Überbeanspruchung der Verschleissteile (Überzüge und Polster). Vereinbaren Sie nach spätestens 2 Jahren (oder gemäss Ansage) einen Kontrolltermin zur Überprüfung der Aktualität Ihrer Schuheinlagen. Wir betreiben bei Interesse einen SMS- oder E-Mail-Reminder.

Falls Sie bei Ihrer Krankenkasse eine Zusatzversicherung haben, lohnt es sich die Rechnung, nach der Bezahlung, zusammen mit der ärztlichen Verordnung einzureichen.

Wir wünschen Ihnen schmerzfreie Schritte.

Härdi Orthotech AG